


TPAK paineilmarintasetti TM-303
Vain kertakäyttöön
14 Gauge x 8,26 cm (3,25 tuumaa)

TPAK käyttöohjeet koulutetulle ensihoitohenkilölle

- Laita neula/katetri vamman puolelta toisen ja kolmannen kylkiluun välistä keskisolisviivasta (kuva 1)
- Käytä antimikrobista liuosta puhdistamaan pistopaikka
- Varmista että neulan sinetti on ehjä. Jos sinetti ei ole ehjä, älä käytä settiä. Kierrä punaista korkkia voimakkaasti sinetin murtamiseksi ja poista korkki
- Ota TPAK-neula/katetri pois kotelostaan
- Pistä neula/katetrikokonaisuus potilaan ihoon kolmannen kylkiluun yläreunan päältä keskisolisviivasta. Ohjaa neula/katetri kylkiluiden väliseen tilaan kohtisuoraan rintakehään nähden. Varmistaen huolellisesti että pisto ei suuntaudu nänniä tai sydäntä kohti
- Neulan/katetrin ollessa oikein pleuratilassa kuulet ilman purkautuvan keuhkopussista paineilmarinnan purkaututessa
- Poista neula, mutta jätä katetri paikalleen. Suojaa se koulutuksessa saamasi ohjeistuksen mukaisesti
- Seuraa potilasta huolellisesti paineilmarinnan uusiutumisen tai hengitysvaikeuksien varalta

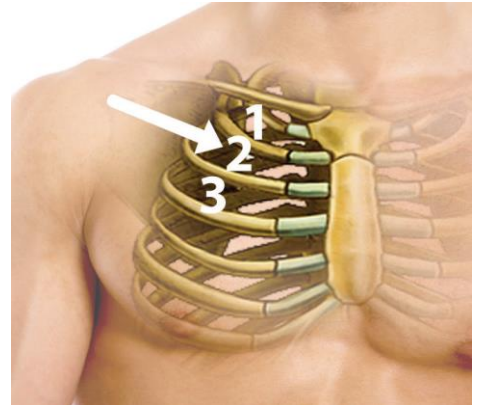

kuva 1

Huomio! Henkilökohtainen suojautuminen

Toimi aina henkilökohtaisen suojautumisen käytäntöjen mukaisesti, käytä käsineitä ja suojaa silmäsi välttääksesi joutumasta kosketuksiin epäpuhtaiden nesteiden kanssa.

Hävittäminen

TPAK on kertakäyttöväline, eikä sitä saa käyttää uudelleen missään tilanteessa. Sitä voi käyttää kerran, minkä jälkeen se täytyy hävittää asianmukaisesti. Varmista TPAKia hävittäessäsi, että estät mahdollisesti tartuttavien aineiden leviämisen.

Varastointi

Pidä TPAK-paineilmarintasetti kuivana, varastoituna -12-+60 asteen lämpötilassa.

Varoitus

TPAK-paineilmarintasetti on tarkoitettu vain asianmukaisesti paineilmarinnan purkuun koulutetun ammattihenkilöstön käyttöön. TPAKin vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vammoja. Käytä TPAKia ensihoidon vastuutahon tai lääkärin ohjeistuksen mukaan.