



Zoll X- sarjan elvytysdatan lähetys

Muista kirjata ennen datan lähetystä potilaan tiedot samaan kohtaan, mihin kirjaisit ne ekg:n lähetystäkin varten!


Siirry ensin deffan vasemmassa reunassa olevasta nuolesta toiseen valikkoon

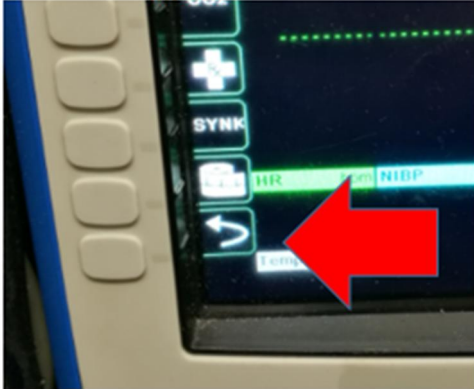

Valitse sen jälkeen Loki ja kirjekuori

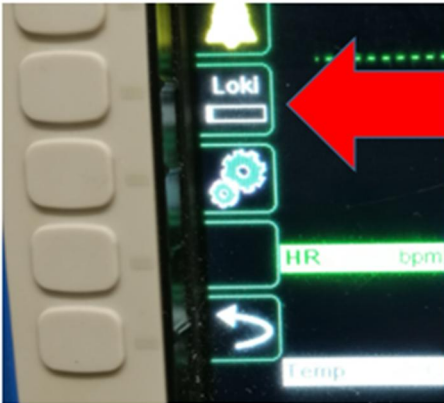


Seuraavaksi deffa kysyy, että suljetaanko nykyinen tapaus, ja se pitää hyväksyä painamalla valitsin-painiketta.

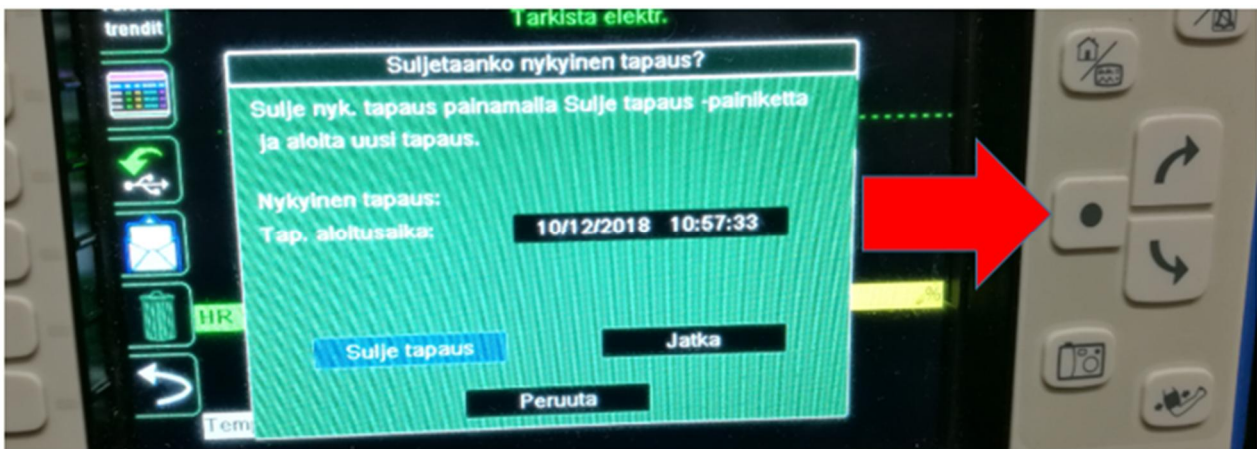


Tämän jälkeen pääset valitsemaan tapauksen, jota olet lähettämässä. Paina jälleen valitsin- painiketta, jotta pääset tapausvalikkoon, ja sen jälkeen siirry nuolinäppäimillä oikeaan tapaukseen ja hyväksy se valitsin- painikkeella.



Kun olet aktivoinut lähetettävän tapauksen, paina kotinäppäintä, jolla valintaruutu siirtyy "Siirrä" kohtaan. Tämän jälkeen paina taas valitsin näppäintä, ja deffa aloittaa tiedon siirron.

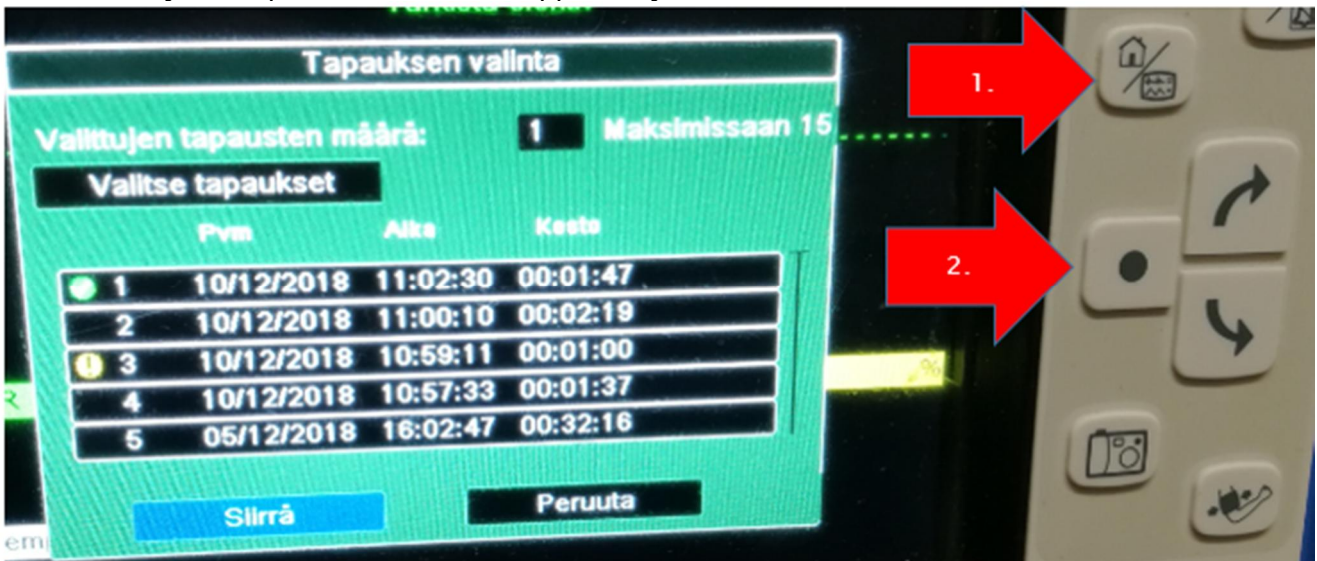

Tämän jälkeen ruudulla näkyy kuvake, joka kertoo missä vaiheessa siirto on.

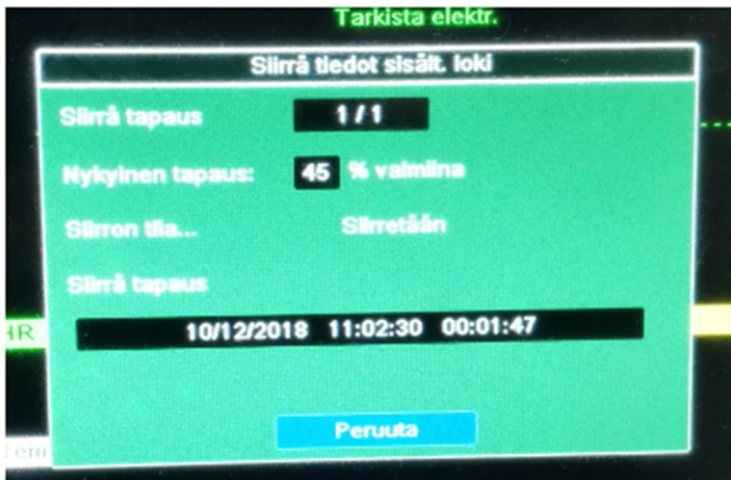

Viimeisenä ruutuun pitäisi tulla ilmoitus siitä, että tiedon siirto on onnistunut!

